

## NAZWA PRODUKTU

A2\_tds0106\_Klamra na wrastające paznokcie

## DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☒ Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- ☒ Zbyt mocne dokręcanie klamry może prowadzić do nadmiernego bólu lub uszkodzenia paznokcia – należy dokręcać ją z umiarem.
- ☒ Unikać stosowania klamry w przypadku otwartych ran lub infekcji na paznokciu.
- ☒ Nie używać klamry w przypadku dużych zniekształceń paznokci bez konsultacji z lekarzem.
- ☒ W przypadku wystąpienia silnego bólu lub innych niepokojących objawów, natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- ☒ Po zakończeniu zabiegu, upewnić się, że paznokieć jest dokładnie wysuszony, aby zapobiec infekcjom.
- ☒ Regularnie dezynfekować narzędzia przed i po każdym użyciu.

## ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☒ **Przed użyciem:** Dokładnie umyj ręce i paznokcie, a także zdezynfekuj klamrę oraz narzędzia, aby zapewnić higieniczne warunki podczas zabiegu.
- ☒ **Stosowanie na suche paznokcie:** Upewnij się, że paznokcie są suche przed zastosowaniem klamry, aby poprawić przyczepność i skuteczność urządzenia.
- ☒ **Nie przekraczaj poziomu bólu:** Podczas dokręcania klamry nie należy przesadzać z siłą. Dokręć ją do momentu, w którym poczujesz delikatny nacisk, ale nie ból. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenie paznokcia.
- ☒ **Czas stosowania:** Regularność zabiegów jest kluczowa. W przypadku większych zniekształceń paznokcia, zabieg może wymagać powtórzenia po 24 godzinach przerwy.
- ☒ **Zanurzenie w wodzie:** Po dokręceniu klamry, zanurz stopy w ciepłej wodzie przez około 20 minut. To pomoże zmiękczyć paznokieć i ułatwić jego korekcję.
- ☒ **Obserwuj postępy:** Regularnie monitoruj stan paznokcia i obserwuj wszelkie zmiany. W razie potrzeby dostosuj siłę docisku klamry.
- ☒ **Pielęgnacja po zabiegu:** Po zdjęciu klamry, upewnij się, że paznokieć jest dobrze wysuszony, aby zapobiec infekcjom. Możesz również nałożyć na paznokieć delikatny krem nawilżający.
- ☒ **Konsultacja z lekarzem:** W przypadku bardzo zaawansowanego wrastania paznokcia lub gdy ból staje się nie do zniesienia, skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą.
- ☒ **Regularne dezynfekowanie narzędzi:** Po każdym użyciu dokładnie oczyść i zdezynfekuj narzędzia, aby zapewnić ich długotrwałą i bezpieczną eksploatację.
- ☒ **Unikaj używania w przypadku infekcji:** Jeśli zauważysz objawy infekcji lub otwarte rany na paznokciu, skonsultuj się z lekarzem przed dalszym stosowaniem klamry.
- ☒ **Pielęgnacja skóry i włosów:** Dzięki funkcji masażu i zmiękczeniu wody, korzystanie z tej słuchawki jest korzystne dla kondycji skóry i włosów. Zwróć uwagę na to, aby nie używać bardzo twardej wody, która może negatywnie wpływać na nawilżenie skóry.
- ☒ **Bezpieczne użytkowanie:** Pamiętaj, aby słuchawka była zawsze dobrze zamontowana i szczelna, by uniknąć przypadkowych wycieków wody.

## OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1.  **Otwarte rany lub infekcje:** Nie stosować klamry na paznokciach, które są uszkodzone, mają otwarte rany lub są zainfekowane, aby uniknąć pogorszenia stanu zdrowia i infekcji.
2.  **Choroby skóry:** Osoby z chorobami skóry w obrębie paznokci (np. grzybica, egzema) powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem klamry, aby uniknąć podrażnień lub zakażeń.
3.  **Problemy z krążeniem:** Osoby z problemami z krążeniem krwi, takimi jak choroby naczyń obwodowych, powinny unikać stosowania klamry bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ może to pogorszyć ich stan zdrowia.
4.  **Alergia na materiały:** Jeśli występuje alergia na miedź, stal nierdzewną lub inne materiały użyte w produkcie, należy unikać jego stosowania.
5.  **Zbyt zaawansowane wrastanie paznokci:** W przypadku bardzo głębokiego wrastania paznokcia, gdzie samodzielne leczenie może nie wystarczyć, konieczna jest wizyta u specjalisty, aby uniknąć poważnych komplikacji.
6.  **Ciężka deformacja paznokcia:** W przypadku poważnych deformacji paznokcia, które mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń, zaleca się skonsultowanie się z dermatologiem lub podiatrykiem przed użyciem klamry.
7.  **Dzieci i młodzież:** Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci, ze względu na ryzyko niewłaściwego użycia i brak pełnej kontroli nad siłą docisku.
8.  **Przeciwwskazania w czasie ciąży:** Kobiety w ciąży, zwłaszcza w zaawansowanej ciąży, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania klamry, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji zdrowotnych.
9.  **Ból lub dyskomfort:** Jeśli podczas stosowania klamry odczuwasz silny ból, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.